

## Bausch & Lomb ReNu® MPST™ Универсальный раствор

Данная инструкция содержит важную информацию. Пожалуйста, прочитайте внимательно и сохраните.

Раствор Bausch & Lomb ReNu® MPST™ представляет собой стерильный изотонический универсальный раствор с буфером. Используется для ежедневной очистки, дезинфекции, смазки, промывки и хранения любых мягких контактных линз.

### Состав:

стерильный раствор, содержащий борную кислоту, эдетатдинатрий, борат натрия и хлорид натрия;  
активные компоненты: DYMED™ (полиаминопропил бигуанид) 0,00005%, полоксамин 1%.  
НЕ СОДЕРЖИТ ХЛОРГЕКСИДИН И ТИМЕРОСАЛ.

**Инструкции:** Всегда мойте руки перед обработкой линз. Снятые линзы следует тщательно очистить, промыть и положить на хранение в свежий раствор для их дезинфекции.

Для тщательного очищения и дезинфекции Ваших линз, Вы должны выполнять все из нижеприведенных шагов каждый раз когда вы снимаете линзы.

**Шаг 1:** Поместите 3 капли универсального раствора **ReNu MPS** на каждую поверхность линзы и мягко потрите 20 секунд каждую сторону линзы. Дополнительный очиститель не требуется.

**Шаг 2:** Для удаления поверхностных соринки тщательно промойте линзу свежим универсальным раствором **ReNu MPS**.

**Шаг 3:** Положите очищенную контактную линзу в соответствующее отделение контейнера для линз и наполните свежим универсальным раствором **ReNu MPS**. **ОСТАВЬТЕ ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ НА 4 ЧАСА** или на ночь. Вы можете хранить Ваши линзы в неоткрываемом контейнере для линз максимум до 30 суток.

Выньте Ваши линзы из контейнера для линз и поместите на глаза. После каждого использования вылейте из контейнера для линз универсальный раствор **ReNu® MPST™** затем сполосните контейнер свежим универсальным раствором **ReNu® MPST™** и дайте высохнуть на воздухе.

**ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ УХОД:** Протеиновая очистка при помощи энзимного очистителя может быть необходимой для некоторых пациентов. Пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим офтальмологом.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При уходе за линзами следуйте рекомендациям Вашего офтальмолога. Несоблюдение описанных выше процедур может привести к развитию серьезных инфекционных заболеваний глаз.

Меняйте универсальный раствор **BAUSCH & LOMB ReNu® MPST™** в контейнере после каждого использования.

- Не касайтесь наконечником флакона каких-либо поверхностей или глаз, это может привести к загрязнению раствора или повреждению глаз.
- Закрывайте флакон колпачком, когда не используете раствор для избежания загрязнения или испарения.
- Не используйте повторно этот раствор.
- Не используйте универсальный раствор **BAUSCH & LOMB ReNu® MPST™** для дезинфекции термическим методом.
- Не используйте раствор из флакона, вскрытого более 6 месяцев назад.
- Не используйте после даты истечения срока.
- Не применяйте в сочетании с этим раствором другие лекарственные препараты, если это не предписано вашим врачом.
- Храните в недоступных для детей местах.

### Внимание:

Если возникают и не проходят такие явления как раздражение и покраснение глаз немедленно прекратите применение этого средства и обратитесь к своему офтальмологу.



Юридический адрес корпорации: Бауш энд Ломб Инкорпорация, Рочестер, Нью-Йорк 14609, США

CE 0050



Юридический адрес корпорации в Европе: Бауш энд Ломб Инкорпорация, 106 Лондон Роуд, Кингстон-апон-Темс, KT2 6TN, Великобритания

Сделано в Италии/Зроблено в Италиі/Made in Italy

Регистрационное удостоверение ФС №2006/2477

Представительство компании Бауш энд Ломб Б.В. в России и странах СНГ

Юридический/почтовый адрес: 117049, г.Москва, ул.Коровий Вал д.7, стр.1, тел. (7 495) 969 2130, факс (7 495) 969 2129.