

Универсальный раствор BAUSCH & LOMB ReNu представляет собой стерильный раствор со сбалансированным содержанием pH. Он используется для ежедневной очистки, дезинфекции, смазки, промывки и хранения любых мягких контактных линз.

**Состав:** стерильный раствор, содержащий борную кислоту, эдетатдинатрий, борат натрия и хлорид натрия; активные ингредиенты: DYMED (полиаминопропилбигуанид) 0,00005%, полоксамин 1% веса/объема.

**НЕ СОДЕРЖИТ ХЛОРГЕКСИДИН И ТИМЕРОЗАЛ.**

**Указания:** Всегда мыть руки перед тем, как обращаться с линзами. Каждый раз при снятии линз в целях дезинфекции, их следует тщательно очистить, промыть и погрузить в раствор.

### ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

#### Этап 1: Ежедневная очистка

Наполнить футляр для хранения линз свежим универсальным раствором BAUSCH & LOMB ReNu. Вынуть линзу из правого глаза. Положить линзу на ладонь и смочить ее несколькими каплями универсального раствора BAUSCH & LOMB ReNu. Осторожно протереть линзу указательным пальцем, совершая движения по прямой линии.

#### Этап 2: Промывка

Тщательно промыть линзу при помощи свежего универсального раствора BAUSCH & LOMB ReNu.

#### Этап 3: Дезинфекция

Положить линзу в соответствующее гнездо в футляре. Линза должна быть полностью погружена в универсальный раствор BAUSCH & LOMB ReNu. Закрыть гнездо крышками и повторить ту же операцию с линзой левого глаза.

Оставить линзы в закрытом футляре на ночь или по крайней мере на четыре часа.

Вынуть линзы из футляра и вставить их в глаза. После дезинфекции линзы можно использовать без предварительного ополаскивания.

Слить из футляра для хранения линз универсальный раствор BAUSCH & LOMB ReNu и ополоснуть футляр свежим раствором BAUSCH & LOMB ReNu. Не закрывая гнезда крышками, просушить футляр на воздухе. Затем установить крышки на место. Футляр готов к дальнейшему использованию.

**Внимание:** в случае длительного или усиливающегося раздражения глаз или чрезмерного слезоотделения вынуть линзы из глаз и немедленно обратиться к офтальмологу.



Этап 1  
Ежедневная очистка



Этап 2  
Промывка



Этап 3  
Дезинфекция

### СМАЗКА

Если при ношении линз возникает легкое раздражение глаз или ощущение дискомфорта, капнуть в глаз одну каплю смазывающего раствора BAUSCH & LOMB SENSITIVE EYES Lens Lubricant и моргнуть два-три раза. Для этой цели можно также использовать универсальный раствор BAUSCH & LOMB ReNu. Если ощущение дискомфорта не исчезнет, следует вынуть линзы и обратиться к офтальмологу.

### ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ УХОД

Для обеспечения максимального комфорта, хорошей видимости и гигиены глаз следует еженедельно удалять с линз белковые отложения при помощи таблеток BAUSCH & LOMB SENSITIVE EYES Protein Removal Tablets, растворяемых в универсальном растворе BAUSCH & LOMB ReNu. После удаления белковых отложений линзы следует очистить и продезинфицировать перед их дальнейшим использованием.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Необходимо выполнять правила по уходу за линзами, рекомендуемые Вашим врачом. Несоблюдение указаний может привести к серьезным инфекционным заболеваниям глаз.
- После каждого использования сливать из футляра универсальный раствор BAUSCH & LOMB ReNu.
- Во избежание загрязнения раствора не допускать соприкосновения наконечника флакона с посторонними предметами. Флакон следует всегда хранить закрытым во избежание загрязнения или испарения жидкости.
- Не применять универсальный раствор BAUSCH & LOMB ReNu при использовании термического способа дезинфекции.
- Хранить при комнатной температуре (15-30 °C).
- Не пользоваться раствором из флакона, вскрытого более 6 месяцев назад.
- Не использовать по истечении указанного срока годности.
- Использование каких-либо лекарственных препаратов для глаз одновременно с раствором допускается только под наблюдением врача.
- Хранить в недоступном для детей месте.

Универсальный раствор BAUSCH & LOMB ReNu выпускается в следующих упаковках: 240 мл и 355 мл.

Дистрибьютор:

**BAUSCH & LOMB**  
Rochester, New York  
U.S.A. 14603-0743

Изготовлено фирмой BAUSCH & LOMB - IOM S.p.A. - 20050 Макерио (Милан), Италия.

BAUSCH & LOMB ReNu, SENSITIVE EYES и DYMED - торговые марки фирмы BAUSCH & LOMB Incorporated.

Дата: 1996/05



ИМ15

CE 0050

IB1808612-02